

# Kako koristiti inhaler Zonda

Za svako liječenje nužna je pravilna primjena lijekova kako bi se postigla potpuna kontrola bolesti. Isključivo pravilnom uporabom inhalera u liječenju KOPBa, pacijent prima propisanu dozu lijeka.

**Prije korištenja Zonde pažljivo proučite upute.**




Zonda® je posebno izrađen inhaler za primjenu kapsula lijeka kojeg vam je uz Zondu propisao vaš liječnik. Nemojte koristiti inhaler Zonda® za uzimanje drugog lijeka.



Uz inhaler Zonda® je priložena bočica s prozirnim kapsulama lijeka koje vam omogućuju provjeriti jeste li uzeli cijelu dozu.



Za uporabu inhalera najprije podignite zaštitnu kapicu.

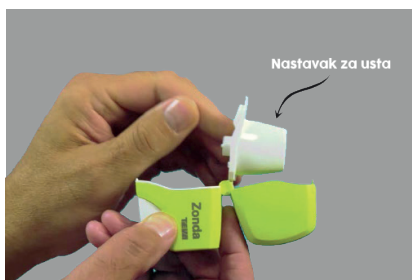


Čvrsto držite kućište inhalera i otvorite nastavak za usta povlačeći ga prema gore.



Izvadite jednu kapsulu iz bočice neposredno prije primjene. Čvrsto zatvorite bočicu. Lijek uvijek čuvajte u originalnoj bočici.



Stavite jednu kapsulu u ležište za kapsulu.

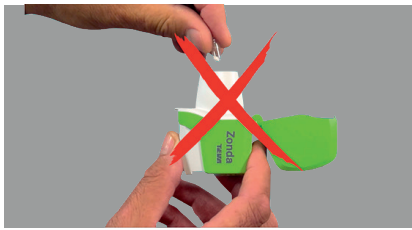


Kapsulu nikad ne stavljajte izravno u nastavak za usta.



Dobro zatvorite nastavak za usta tako da čujete klik. Zaštitnu kapicu ostavite otvorenu.



Držite inhaler s nastavkom za usta okrenutim prema gore. Snažno, samo jednom pritisnite i otpustite gumb za probijanje. To će probušiti kapsulu i omogućiti oslobađanje lijeka prilikom udisanja.

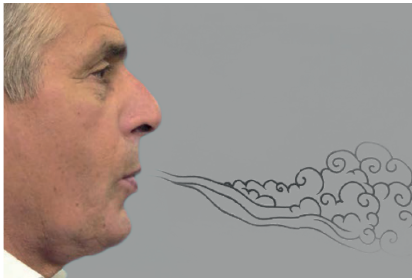


Potpuno izdahnite zrak. Važno je izdahnuti podalje od nastavka za usta. Nikada ne dišite u nastavak za usta.




Stavite nastavak za usta u usta i glavu držite u uspravnom položaju. Nastavak za usta čvrsto obuhvatite usnama i udahnite sporo i duboko tako da čujete ili osjetite vibracije kapsule unutar kućišta.

Zadržite dah što je moguće dulje i u isto vrijeme izvadite inhaler iz usta. Nastavite disati normalno.

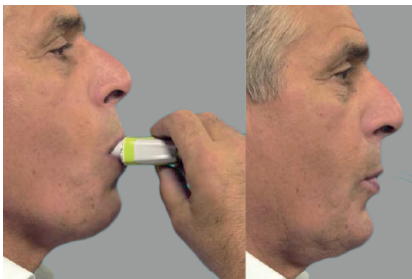

Podignite nastavak za usta i provjerite je li kapsula prazna. Ukoliko kapsula nije prazna, ponovite korake izdisanja i udisanja lijeka kako biste do kraja ispraznili kapsulu.

Zapamtite da zrak treba izdahnuti podalje od nastavka za usta.

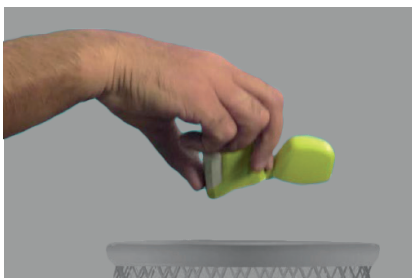

Nakon uporabe ponovno otvorite nastavak za usta i bacite praznu kapsulu. Zatvorite nastavak za usta i zaštitnu kapicu te odložite inhaler Zonda®.