

UPUTA ZA UPORABU AUTOHALERA

Prije korištenja Autohalera pažljivo proučite upute.



KORAK

1

Skinite poklopac aplikatora za usta tako da rub na stražnjem dijelu povučete prema dolje.

KORAK

2


Držite Autohaler uspravno. Podignite ručicu (nastavak na vrhu inhalatora) prema gore. Važno je da rukom ne blokirate izlazni ventil (na slici oznaka X) koji se nalazi na donjoj strani inhalatora.



KORAK

3

Izdahnite zrak koliko možete bez napora, zatim stavite aplikator za usta u usta i okružite ga usnama.

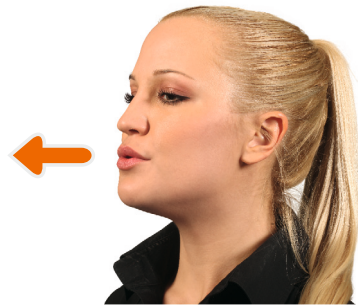

KORAK

4

Polako i duboko udahnite kroz aplikator za usta. Ne zaustavljajte udah kad čujete "klik" i osjetite lijek u ustima.



KORAK

5

Zadržite dah oko 10 sekundi, potom polako izdahnite.



KORAK

6

Nakon svakog udaha važno je ručicu pritisnuti prema dolje. Ako Vam je liječnik propisao više od jednog udaha, ponovite korake od 2 do 6. Nakon uporabe vratite poklopac na aplikator za usta.



NAPOMENA: Ako je inhalator nov ili ako ga niste koristili dva tjedna ili više, prije uporabe lijek morate dva puta raspršiti u zrak radi provjere rada inhalatora.